

FISA TEHNICA

Dispozitiv extragere venin

Extractorul de venin pentru prevenirea raspandirii otravii in corp extrage fara durere veninul din muscaturile de serpi, insecte, paianjeni etc.

Produsul vine insotit de 4 ventuze de aspirare, de dimensiuni diferite si este cea mai eficace metoda de tratament, in prima urgenta, a muscaturilor si intepaturilor de animale/insecte.

In cazul intepaturii de insecte, nu extrageti acul. Aplicati direct extractorul de venin.

Acul din rana va actiona ca un canal prin care veninul va fi extras.

Instructiuni de folosire:

1. Curatati zona afectata;
2. Scoateti extractorul si alegeti ventuza de aspiratie potrivita;
3. Trageti de pistonul extractorului si atasati ventuza;
4. Pozitionati deasupra muscaturii si impingeti pistonul - asteptati 30 secunde. Indepartati extractorul (trageti pistonul mai intai), curatati zona cu un tampoan impregnat cu alcool;
5. Repetati procedura.

Fabricat in China

Mod de ambalare: cutie

